

## 高致病性蓝耳病病毒荧光 RT-PCR 检测试剂盒

Real-Time RT-PCR for detection of

Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome virus (HPPRRS)

(50 reactions)

### 1、试剂盒简介

货号：HB-307

高致病性猪蓝耳病是由猪繁殖与呼吸综合征（俗称蓝耳病）病毒变异株引起猪的一种高度易感性传染病。病毒基因组为不分节段的单股正链 RNA。根据抗原和基因差异，PRRS 可分为两个基因型，即北美（NA）株（VR-2332），又称 2 型株；欧洲（EU）株（Lelystadt virus, LV），也称 1 型株。本试剂盒根据美洲型和欧洲型及在国内流行株病毒基因特定的序列，合成两对特异性引物和一条特异性的荧光双标记探针。探针的 5'端和 3'端分别标记不同的荧光素，5'端标记 FAM 荧光素，3'端是 BHQ1 修饰。本试剂盒是参考世界动物卫生组织（OIE）第 3.8.6 章 PRRS 生产，同时也参考了国家标准《猪繁殖与呼吸综合征病毒荧光 RT-PCR 检测方法》GB/T 35912-2018 和中国兽医药学会团体标准《猪繁殖与呼吸综合征病毒实时荧光 RT-PCR 检测方法》T/CVMA 12—2018，经过优化生产，可同时检测出美洲型、欧洲型及在国内流行的高致病性猪蓝耳病病毒核酸。

### 2、试剂盒组成

试剂盒核酸扩增试剂。具体组成参见表 1：

表 1：试剂盒组成（50test/盒）

试剂盒组成成分	体积
核酸扩增试剂：	
DEPC 水	1ml × 1 管
HPPRRS 荧光 RT-PCR 反应液	750μL × 1 管
酶混合物	60μL × 1 管
阴性对照	1ml × 1 管
HPPRRS 荧光阳性对照	1ml × 1 管

（注：推荐使用提取核酸更快捷方便的《病毒基因组 DNA/RNA 离心柱型提取试剂盒》）

### 3、样本采集, 存放及运输

3.1 样本采集：所用取样器材必须经高压灭菌并烘干。

用于检测多种样本（如猪活体及其脏器、血液、排泄物和细胞培养物）中高致病性蓝耳病病毒的 RNA，对不易分离到病毒的精液或受热分解的组织样品，采用病毒核酸检测也很有效。血浆不宜使用肝素抗凝，血液样品直接分离血清或血浆。

3.2 存放：样品应尽快研磨提取核酸进行检测，-70 °C 以下可长期保存，但应避免反复冻融。

3.3 运输：采用冰壶或泡沫箱加冰密封进行运输。

### 4、荧光 RT-PCR 检测

公司地址：北京市顺义区南法信顺畅大道 14 号院东亚首航国际 1 号楼 3 层 329 室

公司网址：www.halcyonbio.com

邮 箱：haisentong@126.com

电话：010-50933811, 13718421576, 17718526815

客服 QQ：737481857 835171324

#### 4.1 操作方法

##### 4.1.1 样本的处理（在样本制备区进行）：

- 4.1.1.1 取 n 个灭菌的 1.5 mL Eppendorf 管，其中 n 为被检样品、阳性对照与阴性对照的和（阳性对照、阴性对照在试剂盒中已标出），做标记。（注：试剂盒中的阳性对照吹打混匀后直接作为 PCR 检测的模板，无需提取核酸）
- 4.1.1.2 每管加入 600  $\mu$ L 裂解液，分别加入被检样本、阴性对照、阳性对照各 200  $\mu$ L，一份样本换用一个吸头，再加入 200  $\mu$ L 氯仿，混匀器上振荡混匀 5 s（不能过于强烈，以免产生乳化层，也可以用手颠倒混匀），于 4 $^{\circ}$ C 12 000 r/min 离心 15 min。
- 4.1.1.3 取与 4.1.1.1 相同数量灭菌的 1.5 mL Eppendorf 管，加入 500  $\mu$ L 异丙醇（-20 $^{\circ}$ C 预冷），做标记。吸取 4.1.1.2 各管中的上清液转移至相应的管中，上清液应至少吸取 500 $\mu$ L，不能吸出中间层，颠倒混匀。
- 4.1.1.4 于 4 $^{\circ}$ C、12 000 r/min 离心 15 min（Eppendorf 管开口保持朝离心机转轴方向放置），小心倒去上清，倒置于吸水纸上，沾干液体（不同样品须在吸水纸不同地方沾干）；加入 600  $\mu$ L 75%乙醇，颠倒洗涤。
- 4.1.1.5 于 4 $^{\circ}$ C、12 000 r/min 离心 10 min（Eppendorf 管开口保持朝离心机转轴方向放置），小心倒去上清，倒置于吸水纸上，尽量沾干液体（不同样品须在吸水纸不同地方沾干）。
- 4.1.1.6 4 000 r/min 离心 10s（Eppendorf 管开口保持朝离心机转轴方向放置），将管壁上的残余液体甩到管底部，小心倒去上清，用微量加样器将其吸干，一份样本换用一个吸头，吸头不要碰到有沉淀一面，室温干燥 3 min，不能过于干燥，以免 RNA 不溶。
- 4.1.1.7 加入 33  $\mu$ L DEPC 水，轻轻混匀，溶解管壁上的 RNA，2 000 r/min 离心 5 s，冰上保存备用。提取的 RNA 须在 2 h 内进行 PCR 扩增；若需长期保存须放置 -70 $^{\circ}$ C 冰箱内。

【推荐使用《《病毒基因组 DNA/RNA 离心柱型提取试剂盒》》，更方便快捷高效提取核酸】。

注：提取的 RNA 须在 2 h 内进行 PCR 扩增；若需长期保存须放置 -70 $^{\circ}$ C 冰箱内。

##### 4.1.2 检测

##### 4.1.2.1 扩增试剂准备（在反应混合物配制区进行）：

从试剂盒中取出相应的荧光 RT-PCR 反应液、酶混合物，在室温下融化后，2000 r/min 离心 5 s。设所需荧光 RT-PCR 检测总数为 n，其中 n 为被检样品、阳性对照与阴性对照的和，每个样品测试反应体系配制见表 2：

表 2 每个样品测试反应体系配制表

试剂	荧光 RT-PCR 反应液	酶混合物
用量	15 $\mu$ L	1.0 $\mu$ L

根据测试样品的数量计算好各试剂的使用量，加入到适当体积试管中，充分混合均匀，向每个荧光 RT-PCR 管中各分装 15 $\mu$ L，转移至样本处理区。

##### 4.1.2.2 加样（样本处理区进行）：

在各设定的荧光 RT-PCR 管中分别加入上述样本处理步骤 4.1.1.7 中制备的 RNA 溶液各 10  $\mu$ L，盖紧管盖，500 r/min 离心 30 s。（阳性对照不需要提取核酸，可以直接吹打混匀后吸取当模板）

##### 4.1.2.3 荧光 RT-PCR 检测（在检测区进行）：

将 4.1.2.2 中离心后的 PCR 管放入荧光 RT-PCR 检测仪内，记录样本摆放顺序。

循环条件设置：

第一阶段，反转录 42 $^{\circ}$ C/30 min；

第二阶段，预变性 94 $^{\circ}$ C/2 min；

第三阶段，94 $^{\circ}$ C /15sec，53 $^{\circ}$ C/10sec，60 $^{\circ}$ C/30sec 共 40 个循环。荧光收集在第三阶段每次循环的 60 $^{\circ}$ C 延伸时进行。

试验检测结束后，根据收集的荧光曲线和Ct值判定结果。

## 4.2 结果判定

**4.2.1 结果分析条件的设定** 阈值设定原则：根据仪器噪声情况进行调整，以阈值线刚好超过阴性对照品扩增曲线的最高点为准。对于多通道荧光 PCR 仪，选定 FAM(465-510)检测通道读取检测结果，ABI 仪器选择 5' FAM; 3' BHQ1 淬灭基团。

### 4.2.2 质控标准

- 阴性对照无 Ct/Cp 值并且无扩增曲线。
- 阳性对照的 Ct/Cp 值应小于等于 28，并出现典型的扩增曲线。
- 如阴性和阳性对照不满足以上条件，此次实验视为无效。

### 4.2.3 结果判定

- 阴性：无 Ct/Cp 值，且无特征性扩增曲线，表明样品为阴性。
- 阳性：Ct/Cp 值 $\leq$ 30.0，且出现典型的扩增曲线，表示样品为阳性，含有高致病性蓝耳病病毒核酸。
- Ct/Cp 值大于 30.0，且出现典型的扩增曲线的样品建议复验。复验仍出现上述结果的，判为阳性，否则判为阴性。

#### 【注意事项】

- 实验室应至少分三个区：样品处理区、反应混合物配制区和检测区。
- 各区物品均为专用，不得交叉使用，避免污染。检测结束后，应立即对工作台进行清洁。
- 分装反应液时，应尽量避免产生气泡。上机前注意检查各反应管是否盖紧，以免荧光物质泄露污染仪器。
- 阳性对照在吸取前应在微量漩涡振荡器上剧烈振荡 1~2 秒。
- 试剂盒中各组分应避免反复冻融。

**【规格】** 50 份/盒

**【贮藏与有效期】** 荧光 RT-PCR 检测试剂盒-20℃保存，有效期为 12 个月；《病毒基因组 DNA/RNA 离心柱型提取试剂盒》室温保存。